

KioMedine^{vs one}

Osteoartrit tedavisinde
benzersiz sıvı implant

YENİ

Diz osteoartritinin
semptomatik tedavisi için
**karboksimetil-kitozan
sıvı implant**,günlük yaşam
beklentilerinize ulaşmanıza
yardımcı olur.

HASTA BİLGİLENDİRME AMAÇLI
OLUŞTURULMUŞTUR.



KioMedine^{vs}one nedir?

KioMedine^{vs}one diz osteoartritinin semptomatik tedavisi için geliştirilmiş yeni ve benzersiz bir eklem içi enjeksiyondur.



KioMedine® karboksimetil kitozanına dayanır; bu, hayvansal kökenli özüt içermeyen dünya çapında bir ilk üründür.

Kitozan, doğal kökenli bir polisakkarittir (şapkalı mantarlardan elde edilir) ve yenilikçi bir kimyasal yapıya sahip olacak şekilde modifiye edilmiştir; bu da ona benzersiz özellikler kazandırır.

Hyalüronik asit ve doğal kitozandan farklı benzersiz yapısı sayesinde, KM-Kitozan, KioMedine^{vs}sone'a osteoartrit ağrısı ve diğer semptomlarla mücadelede çift etkili özel bir mekanizma sağlar: eklem kayganlığını artırır ve eklemlerdeki oksidatif stresi azaltarak koruma sağlar.

1. GELİŞTİRİLMİŞ SÜRTÜNME AZALTMA


2. EKLEM KORUMASI

**HOMEOSTAZIN
YENİDEN SAĞLANMASI**

Klinik faydalar

- Birçok hasta, **KioMedine^{vs} one** enjeksiyonundan 1–2 hafta içinde diz osteoartritiyle ilişkili ağrılarda rahatlatma yaşamıştır.
- Tek bir enjeksiyon, diz osteoartritinde uzun süreli ağrı rahatlaması sağlamak, eklem sertliğini azaltmak ve fiziksel kapasiteyi artırmak için yeterlidir.

Eklem içi sıvı implant enjeksiyonundan sonra hangi geçici lokal reaksiyonlar görülebilir?

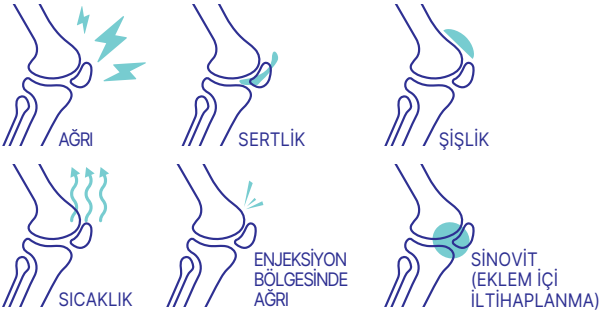

Olası geçici lokal reaksiyonlar nasıl tedavi edilir?

Bu lokal reaksiyonlar, diz osteoartriti olan kişilerde eklem içi enjeksiyon sonrası sık görülen komplikasyonlardır. Tedavisi dinlenme, soğuk kompres ve/veya kompresyon bandajlarını içerir. Bu reaksiyonlar, tedavinin klinik faydalarını etkilemez.

- Geçici lokal reaksiyonlar durumunda, ağız yoluyla ağrı kesici (ör. parasetamol) veya NSAID (ör. ibuprofen) kullanılması önerilir.
- Enjeksiyon sonrası belirtiler bir haftadan uzun sürerse veya belirtileriniz belirgin şekilde kötüleşirse, lütfen pratisyen hekiminizle iletişime geçin.

1. P.J. Emans, G. Skaliczki, D. Haverkamp, J. Bentin, M. Chausson, M. Schiffers, L. Hermitte, P. Douette. First-in-Human Study to Evaluate a Single Injection of KiOmedin^{CM} Chitosan for Treating Symptomatic Knee Osteoarthritis. The Open Rheumatology Journal, 2022; 16.

2. Nils A. Lynen, Christoph Eichhorn, Nicolas Portelange, Mickaël Chausson, Wim Weyenberg. Rheumatol Ther March 2024. Long-Term Efficacy Following Intra-articular Injection of Carboxymethyl-chitosan, a New Product Class for Knee Osteoarthritis: Results from an Observational Study in Germany.

3. Van Overschelde P, Portelange N, Chausson M, Weyenberg W. INJECTIONS INTRA ARTICULAIRES DE CARBOXYMÉTHYL CHITOSANE DANS LA GONARTHROSE DONNÉES DE VIE RÉELLE APRÈS 133 INJECTIONS Poster SFR 2023

4. Data on file.

**Non-steroidal anti-inflammatory drugs.



ÖNERİLER

- **KioMedine^{VS}one** enjeksiyonundan sonraki 48 saat boyunca yoğun fiziksel aktiviteden veya ağır yük taşımaktan kaçının.
- Tedavi edilen dizinizi kademeli olarak kullanmanız ve düzenli egzersiz yapmanız önerilir. Egzersiz, eklem sağlığını korumak ve osteoartrit ilerlemesini yavaşlatmak için önemlidir. Aynı zamanda dizinizi destekleyen kasları güçlendirir ve esnekliği korumaya yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için şu web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.kiomedine.be

ÜRETİCİ FİRMA:



Ürünlerimizin kalite veya güvenliği ile ilgili bir şikayette bulunmak veya bir sorun bildirmek isterseniz, lütfen şu adrese başvurun: vigilance-rheumatology@kiomedpharma.com



genesis
BİYOMEDİKAL A.Ş.

Türkiye Distribütörü

Koza Plaza B Blok. No:72 Kat: 8 Daire 83
Esenler/ İstanbul
T: +(0212) 438 55 06
www.genesisbiyomedikal.com.tr